

Hygienetuch zur Oberflächendesinfektion

Gebrauchsfertiges Tuch mit Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Objektoberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (wirksam gegen alle behüllten Viren, z.B. CoronaViren, gemäß RKI-Empfehlung).

Zusammensetzung: 100g Lösung enthalten: 75g Ethanol, 0,05g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Anwendung: Oberfläche mit dem Tuch abwischen. Die Fläche sollte während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben. Nur zum einmaligen Gebrauch! Nach dem Öffnen sofort verwenden.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Ch.B.: XXXX-XXXX

Verwendbar bis: XX/XXXX

Hergestellt für: goods & foods GmbH
Alleestraße 6
71638 Ludwigsburg

BAuA: Reg-Nr. N-104407